

# Multi-Gyn<sup>®</sup> VAGINAL DOUCHE



LEIA ESTE FOLHETO INFORMATIVO ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR MULTI-GYN DUCHE VAGINAL E PASTILHAS. CONSERVE-O PARA REFERÊNCIA FUTURA.

**Multi-Gyn Duche Vaginal** - Para uma ótima higiene vaginal.

- Lava eficaz e suavemente.
- A válvula especial impede o retorno do líquido, reduz a pressão exercida e cria um efeito de lavagem ideal.
- O formato ergonômico do dispositivo permite que este seja utilizado em várias posições.

#### Indicações

- Higiene vaginal geral.
- Higiene vaginal intensiva em caso de corrimento vaginal excessivo ou com odor desagradável, bem como em caso de prurido, irritação ou sensação de ardor.

Algumas mulheres são mais propensas a desconfortos vaginais do que outras devido ao seu estilo de vida, atividade sexual ou menstruação. Dependendo das suas necessidades de higiene íntima, o Multi-Gyn Duche Vaginal pode ser utilizado mais frequentemente, contudo não é aconselhável utilizar o Multi-Gyn Duche Vaginal mais do que 3 vezes por semana, a menos que haja indicação médica. Em caso de persistência das queixas a nível vaginal, contacte o seu médico ou farmacêutico.


O Multi-Gyn Duche Vaginal pode ser utilizado em várias posições. Encontre a posição que lhe é mais confortável para utilizar o Multi-Gyn Duche Vaginal. É importante que o líquido do duche possa sair facilmente. Pode optar, por exemplo, por utilizar no duche ou na sanita. Veja as instruções ilustradas para utilizar o Multi-Gyn Duche Vaginal.

#### Multi-Gyn Duche Vaginal e gravidez

Caso pretenda engravidar, aconselhamos a não utilizar Multi-Gyn Duche Vaginal até 3 dias após ter relações sexuais. O Multi-Gyn Duche Vaginal não é um contraceptivo. Não existem contra-indicações conhecidas para a utilização do Multi-Gyn Duche Vaginal e de Multi-Gyn Pastilhas durante a gravidez ou amamentação. Contudo, aconselhamos que contacte o seu médico caso esteja grávida.

#### Atenção!

O Multi-Gyn Duche Vaginal não deve ser fervido nem lavado com água a ferver. Ficará deformado sem possibilidade de reparação.

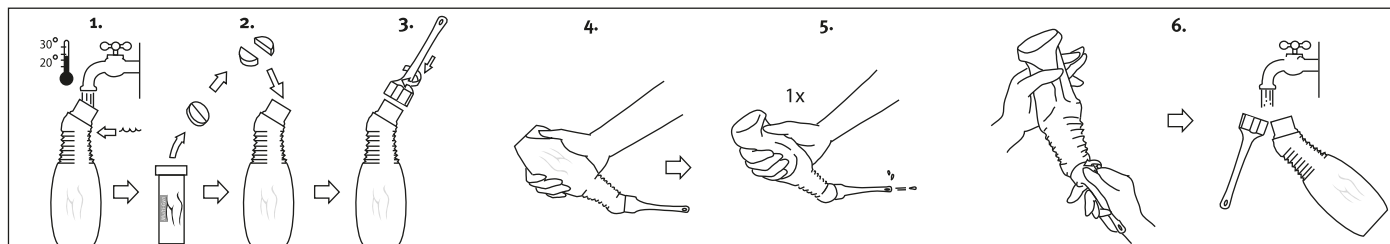

1. Encha o Multi-Gyn Duche Vaginal com água morna até à parte superior das ranhuras.
2. Parta a pastilha ao meio e adicione-a à água.
3. Enrosque o aplicador no frasco e espere até que a pastilha Multi-Gyn se dissolva e o líquido pare de borbulhar.

4. Introduza o aplicador suavemente na vagina.
5. Aperte o frasco suavemente para lavar a vagina com o líquido do duche. É normal que parte do líquido fique no frasco (até metade do frasco).\*

6. Separe o duche do aplicador e lave-o bem com água. Deixe secar naturalmente (de preferência num local seco).

\* A quantidade de líquido é suficiente para lavar a vagina. Se desejar repetir a lavagem com o restante líquido, retire o aplicador de modo a que o frasco volte ao formato original, enrosque novamente o aplicador ao frasco e continue a partir do passo 4.

# Multi-Gyn<sup>®</sup> PASTILHAS (TABLETS)

**Multi-Gyn Pastilhas** - Cria um líquido de duche natural e suave para uma ótima higiene vaginal.

#### Características do produto

- Apenas uma pastilha é suficiente para um frasco de líquido de duche.
- Contém ingredientes naturais, sem perfumes nem conservantes.
- Em combinação com o Multi-Gyn Duche Vaginal, as pastilhas proporcionam uma ótima higiene vaginal.

#### Multi-Gyn Pastilhas com ingredientes naturais para duche vaginal

Multi-Gyn Pastilhas dissolve-se em água morna, criando um líquido de duche suave para ser utilizado com o Multi-Gyn Duche Vaginal. As pastilhas concentradas efervescentes contêm ingredientes naturais sem conservantes. Os ingredientes utilizados no Multi-Gyn Pastilhas não afetam a flora natural da vagina.

#### Ingredientes ativos

Complexo 2QR\*, ácido láctico, ácido ascórbico. Contém: lactose

\* Complexo 2QR, polissacarídeos bioativos patenteados

As pastilhas têm um aspeto granulado e poderão variar um pouco na cor. Estas pequenas variações estão relacionadas com as propriedades naturais do principal ingrediente ativo, o complexo 2QR. Não afetam a eficácia nem a segurança do produto.

#### Armazenamento

Manter fora da vista e do alcance das crianças. É aconselhável manter Multi-Gyn Pastilhas no tubo original num local seco, entre 10°C e 25°C (temperatura ambiente).

CNP. 6211276

Distribuído por:

Sangool Produtos para a Saúde e Higiene, Lda.  
Rua Casal dos Mortais, Nº 8,  
R/C Esq. 2625-692 Vialonga

Fabricado por:  
BioClin BV, Delftechpark 55,  
2628 XJ, Delft, Países Baixos